


研究用

唾液採取用 ストローキット

安全で簡単な検体採取

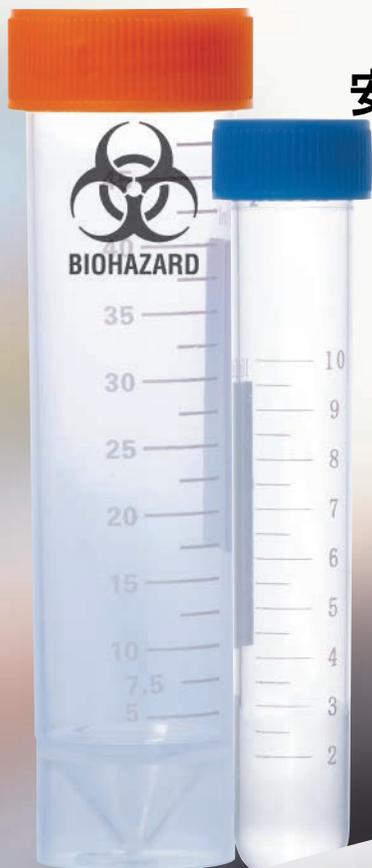

- ・一次容器 10ml(H100mm×Φ20mm) 1本
- ・二次容器 50ml(H114mm×Φ32mm) 1本

カテゴリB バリアパウチの代用品

- ・唾液用ストロー 1本
- ・パラフィルム 1枚

入数 1ケース50セット入

定価 6mm径ストローキット 単価150円
10mm径ストローキット 単価170円

送料別途
送料 ※8ケース(400セット入)以上の
ご注文で送料無料




ストローは個別包装
しています。

ストローによる採取のメリット

唾液による採取は鼻咽頭めぐりよりも採取時の咳やくしゃみによるウイルスの飛沫拡散を抑制し、周囲への感染リスクを軽減することが期待できます。同時に採取する際の痛みも伴わず、どなたでも簡単に採取が可能です。

※原寸大イメージ ※中はキャップ上部 ※容器は予告無く変更する事がございます


唾液採取用ストローキット 採取方法

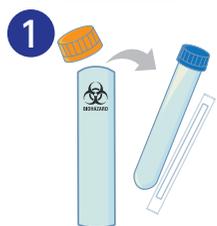

1 二次容器の蓋を開いて
ストローと一次容器を
取り出してください。



2 ストローをくわえ、一次容器の
中に唾液が自然に流れる
ように溜めてください。

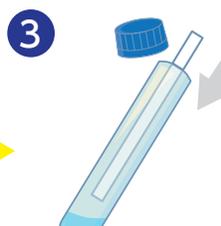

3 唾液が溜まったらストローを
一次容器にそのまま入れて
蓋をしっかりと閉めてください。



4 パラフィルムをシートから
剥がし、**引っ張り伸ばしながら**
巻きつけ、密閉します。



5 一次容器の蓋をしっかりと閉め
二次容器に入れて蓋を
しっかりと閉めてください。

* 本製品は研究用です。研究用以外は使用できません。

販売店

株式会社 **セントラル** 科学貿易

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6
☎ 03-5627-8170 FAX 03-5627-8151

FAX 注文書**FAX 03-5627-8151**

研究用唾液採取用ストローキット

 ご依頼者様の連絡先

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者様名	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	

 お届け先 ※ご依頼者様とお届け先が異なる場合は下記にご記入ください。

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者様名	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	

 唾液採取用ストローキット 注文数一次容器10ml/二次容器50ml/
唾液用ストロー/パラフィルム

1ケース50セット入

6mm径ストローキット 【単価150円】	ケース	10mm径ストローキット 【単価170円】	ケース
-------------------------	-----	--------------------------	-----

大量注文割引ございます。大量注文をご希望の方は別途見積りいたします。お気軽にお電話ください。

特記事項

ご注文ありがとうございます

必要事項をご記入の上、上記番号までFAX下さい。FAX番号はお間違えのないようお願いいたします。

株式会社セントラル科学貿易〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6
TEL:03-5627-8150 FAX:03-5627-8151

研究用

唾液採取用綿棒キット



- 一次容器 10ml (H100mm×Φ20mm) 1本
 - 二次容器 50ml (H114mm×Φ32mm) 1本
- カテゴリB バリアパウチの代用品
- 口腔内拭い綿棒 1本
 - パラフィルム 1枚

入数 1ケース50セット入
定価 綿棒キット 単価180円

送料別途
送料 ※8ケース(400セット入)以上の
ご注文で送料無料



綿棒は個別包装
しています。

唾液採取のメリット


唾液採取用綿棒キットは口内の唾液を採取するタイプで従来の鼻腔ぬぐい液タイプとは違い痛みもなく、くしゃみを誘発することはありません。

※原寸大イメージ ※φはキャップ上部 ※容器は予告無く変更する事がございます


唾液採取用綿棒キット 採取方法



1 二次容器の蓋を開いて綿棒と一次容器を取り出してください。

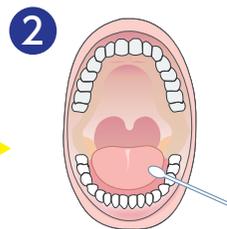


2 口の中を軽くぬぐい十分な唾液を綿棒に染み込ませてください。

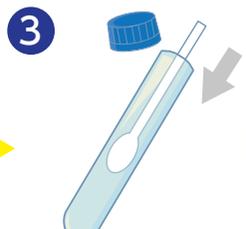

3 唾液の採取ができたら綿棒を一次容器にそのまま入れて蓋をしっかりと閉めてください。



4 パラフィルムをシートから剥がし、一次容器に引っ張り伸ばしながら巻きつけ、密閉します。

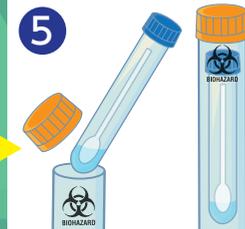

5 一次容器の蓋をしっかりと閉め二次容器に入れて蓋をしっかりと閉めてください。

* 本製品は研究用です。研究用以外は使用できません。

販売店

SC株式会社 **セントラル** 科学貿易

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6
☎ 03-5627-8170 FAX 03-5627-8151

FAX 注文書**FAX 03-5627-8151**

研究用唾液採取用綿棒キット

 ご依頼者様の連絡先

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者様名	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	

 お届け先 ※ご依頼者様とお届け先が異なる場合は下記にご記入ください。

フリガナ		フリガナ	
会社名		ご担当者様名	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	

 唾液採取用綿棒キット 注文数一次容器10ml/二次容器50ml/
口腔内拭い綿棒/パラフィルム

1ケース50セット入

綿棒キット【単価180円】

ケース

大量注文割引ございます。大量注文をご希望の方は別途見積りいたします。お気軽にお電話ください。

特記事項

ご注文ありがとうございます

必要事項をご記入の上、上記番号までFAX下さい。FAX番号はお間違えのないようお願いいたします。

株式会社セントラル科学貿易〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6
TEL:03-5627-8150 FAX:03-5627-8151